

Icon Medlab Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test

Einfache, kurze und schmerzfrei Testung



NEU: zugelassen für anterio-nasale Probenentnahme (Abstrich im vorderen Nasenraum)

Einfache, kurze und schmerzfrei Testung

Icon Medlab Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test

(in Nasenabstrichen, Nasopharyngeal-Abstrichen oder Oropharyngealen Abstrichen)

Der Icon Medlab Rapid SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest ist für **anterio-nasale Probenentnahme zugelassen**. Die Entnahme der Probe erfolgt mit dem mitgelieferten Abstrich Tupfer und kann neben der Probenentnahme im hinteren Nasen-Rachenbereich auch in den beiden vorderen Nasenbereichen und durch oropharyngealen Abstrichen erfolgen. Die Entnahme ist sehr einfach, kurz und völlig schmerzfrei von jeder Person durchzuführen, die zuvor die beiliegende Gebrauchsanweisung gelesen hat.

(Die SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltestkarte kann nicht als Grundlage für die Diagnose oder den Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion verwendet werden)

Der Icon Test weist erregerspezifische N-Proteine (Nucleocapsid-N) nach und erkennt **damit auch die neuen Virusmutationen**. Dies ist seit 15.01.2021 ein verpflichtendes Kriterium des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Sämtliche für den Test notwendige Gebrauchsmaterialien sind bereits im Test-Kit enthalten. Das Testergebnis liegt bereits nach 15 Minuten vor.

Vor Anwendung des Testes lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.



Produktdetails

- Icon Medlab SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (chromatographischer Immunoassay)
- Point of Care Test zum qualitativen Nachweis des SARS-CoV-2 Antigens
- Ermöglicht den Nachweis einer akuten SARS-CoV-2 Infektion
- Empfindlich gegenüber verschiedenen Mutationen
- **Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)** und somit erstattungsfähig gemäß der „Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-COV-2“ des BMG
- **Evaluert vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI)**
- Probenmaterial: Nasopharyngealer Abstrich und oropharyngealer Abstrich
- Einfache Testdurchführung
- Zuverlässige Ergebnisse
- Testergebnis nach 15 Minuten
- Hohe Testkapazität durch geringen zeitlichen Aufwand
- **Sensitivität: 96,08 %**
- **Spezifität: 99,14 %**
- **Genauigkeit: 98,59 %**
- Keine Kreuzreaktionen mit üblichen Influenzaviren
- Lagerung bei 4 bis 30°C
- Testdurchführung bei Raumtemperatur
- Haltbarkeit 18 Monate
- Testdurchführung ortsunabhängig und ohne Labor einsetzbar
- Vom Rückgaberecht ausgeschlossen

Sie haben Fragen zum Produkt oder wollen SARS-CoV-2 Test direkt bestellen?

Rufen Sie uns an unter der Info- und Bestellhotline 06239 9265 700 oder senden Sie uns Ihre Anfrage über anfrage@iconmedlab.com

Inhalt des Kits

- Kit enthält 20 SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest Kassetten
- 20 Sterile Proben-Abstrichtupfer
- 20 Extraktionsröhrchen
- 20 Extraktionspuffer in Einzelampullen abgefüllt
- Röhrchenständer
- Bedienungsanweisung



Qualitätssicherung

- EN ISO 13485:2016
- CoA, Stabilitätsstudien gemäß EC Directive 98/79/EC
- EC-Reg. MP: NL-CA002-2020-52869
GZ: CIBG-20203899
- CFDA Nummer: 20100174 – gültig bis 05.11.2024

Weitere Produkt-Merkmale:




- Extraktions-Puffer in Einmalampullen für jeden einzelnen Test abgefüllt erhöht die Testsicherheit
- Als antero-nasaler Test zugelassen
- Artikel-Nummer 21IC01
- **EAN Nummer: 4260717030004**
- **PZN Nummer: 17212657**

Einfaches Testverfahren (Anterio Nasale Abstrichmethode (Nase vorne))

*Für die **nasopharyngeale Abstrichmethode** (Nasenrachenraum hinten) und **oropharyngeale Abstrichmethode** (Rachen) lesen Sie bitte unsere Gebrauchsanweisung durch

<p>1 Stellen Sie ein Röhrchen in dem mitgelieferten Reagenzien-Röhrchenständer Extraktionslösung aus Einzelampullen in das Röhrchen 8 Tropfen füllen</p>	<p>2 Abstrich mit dem Wattestäbchen aus den beiden vorderen Nasenräume entnehmen.</p>	<p>3 Eine Minute warten. Mischen durch Drücken des Röhrchens und gleichzeitiges rotieren des Tupfers (8-10 Mal)</p>	<p>4 Schließen Sie das Proben-Röhrchen mit dem mitgelieferten Stopfen.</p>	<p>5 Geben Sie 2-3 Tropfen der Probe in die Probenvertiefung der Testkassette</p>	<p>6 Testergebnis in 15 Minuten nach dem Auftragen der Probe ablesen</p>

Testergebnis

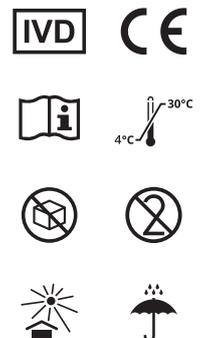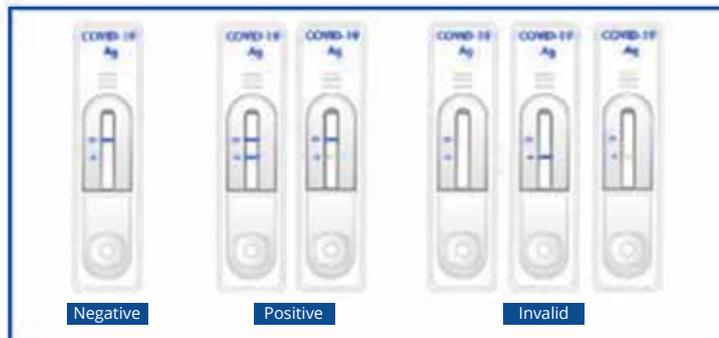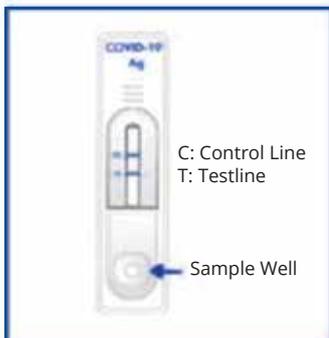

Eine rot gefärbte Bande an der Position der Kontrolllinie 'C' und an der Position der Testlinie 'T' zeigt den positiven Nachweis des SARS-CoV-2 Antigen an. Färbt sich nur Kontrolllinie 'C' ist das Testergebnis negativ. Wenn in der Kontrolllinie 'C' nach 30 Minuten keine rote Bande erscheint, ist das Testergebnis ungültig.

Vertreib durch

Icon Medlab GmbH
Ostring 52 ½ 67240 Bobenheim-Roxheim, Germany
Phone: +49 6239 9265 700 Email: info@iconmedlab.com
www.iconmedlab.com

Hergestellt von

Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park Xiamen,
Fujian 361021 P.R. China
www.bosonbio.com